

Êtes-vous prêt à passer au Dexcom G6?

Le système Dexcom G6 de surveillance du glucose en continu (SGC) vous souhaite la bienvenue. L'application Dexcom G6 vous guidera étape par étape pour configurer votre système, insérer le capteur et fixer l'émetteur. Il n'y a rien de plus simple!

Pour obtenir des instructions détaillées, une étape à la fois, sur l'utilisation du Dexcom G6, consultez le guide [Commencer ici Dexcom G6](#) qui se trouve dans la boîte de votre émetteur.

COMPOSANTS :



Capteur intégré à l'appliqueur

Peut être porté jusqu'à 10 jours.



Émetteur

Autonomie jusqu'à 90 jours.



Appareil intelligent compatible

Vérifiez en ligne la compatibilité de votre appareil intelligent, à dexcom.com/compatibility.

ou



Récepteur

Si vous n'avez pas d'appareil intelligent compatible*, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Dexcom, au numéro **1-844-832-1810 (option 1)**, pour obtenir un récepteur.

POUR COMMENCER

1

Téléchargez et ouvrez l'application Dexcom G6 à l'aide de votre appareil intelligent compatible*

- Pour iPhone : Ouvrez l'App Store, cherchez Dexcom G6 mmol/L et appuyez sur **Obtenir**.
- Pour Android : Ouvrez le Google Play Store, cherchez Dexcom G6 et appuyez sur **Installer**

2

Suivez les instructions de configuration qui s'affichent à l'écran.



RESSOURCES DE FORMATION

Pour des vidéos de formation, des guides pratiques, des FAQ et plus encore, scannez le code QR ou visitez la page Web



www.dexcom.com/fr-CA/formation


AVEZ-VOUS TOUJOURS BESOIN D'AIDE?

Communiquez avec l'équipe de SOINS Dexcom pour recevoir une formation personnalisée sur la SGC et l'une des formes de soutien ci-dessous de la part d'éducatrices et d'éducateurs agréés en diabète :

- Configuration de votre Dexcom G6
- Conseils pour l'insertion du capteur
- Aide pour personnaliser les paramètres et les fonctions de l'application

Composez le **1-844-832-1810 (option 4)**.

Survol de l'application Dexcom G6 :

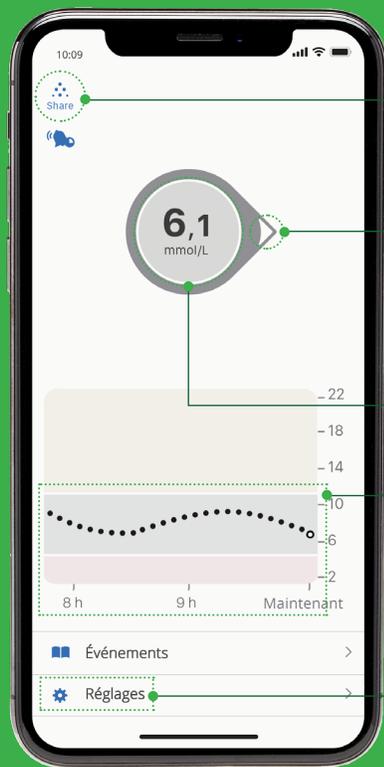

Dexcom Share : Transmettez vos données de glucose à jusqu'à 10 abonnés.

Flèche de tendance : Indique dans quelle direction votre taux de glucose se dirige et à quelle vitesse il évolue.

Résultat de glucose actualisé

Graphique des tendances : Affiche les données de l'historique de votre taux de glucose des 24 dernières heures.

Réglages : Paramétrez vos alertes. Rendez-vous dans Réglages > Alertes, puis appuyez sur une alerte afin de la modifier ou de la désactiver.

Appareil intelligent vendu séparément*

Tirez pleinement parti de votre Dexcom G6 à l'aide des applications suivantes :



Dexcom Clarity

Utilisez le logiciel Dexcom Clarity pour voir l'historique des données et les tendances. Avec Clarity, vous pouvez choisir de transmettre vos données avec votre professionnel de la santé et plus encore.



Dexcom Follow†

Vous pouvez autoriser jusqu'à 10 personnes à suivre votre taux de glucose à distance. Demandez à vos proches de télécharger l'application Dexcom Follow†, pour qu'ils puissent consulter vos données sur le glucose directement à l'écran de leur appareil intelligent.

Avez-vous toujours besoin d'aide? **Composez le 1-844-832-1810**

Questions de nature générale : [Choisissez l'option 1.](#)

Questions à propos des assurances : [Choisissez l'option 2.](#)

Demandes de remplacement de produits ou de dépannage : [Choisissez l'option 3.](#)

Formation des nouveaux utilisateurs et soutien : [Choisissez l'option 4.](#)

* Appareil intelligent vendu séparément. Pour consulter une liste des appareils intelligents compatibles, allez à dexcom.com/compatibility.

† Nécessite une connexion Internet et l'application Follow. Avant de prendre des décisions thérapeutiques, les utilisateurs doivent toujours confirmer les résultats à l'aide du récepteur ou de l'application Dexcom G6.