

dexcomG6

INICIO

Configuración



Sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom G6 (G6)

Dispositivo de visualización

- Muestra información de la glucosa
- Configure su dispositivo inteligente, el receptor Dexcom, o ambos
- Para obtener una lista actualizada de los dispositivos inteligentes y sistemas operativos compatibles, visite: dexcom.com/compatibility

Su dispositivo inteligente




Receptor de Dexcom




Aplicador con sensor integrado

- El aplicador del sensor introduce el sensor debajo de su piel
- El sensor obtiene información de la glucosa

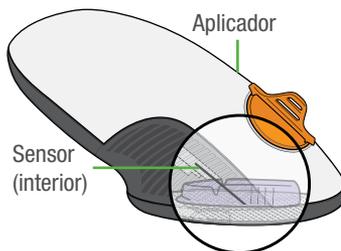

Transmisor

- Envía información de la glucosa del sensor al dispositivo de visualización

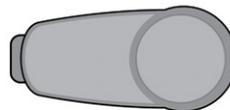

Todos los gráficos son representativos. El producto puede verse diferente.

Revise la Declaración de seguridad en *Uso de su G6, Apéndice E* antes de usar su G6.

Lo que hace

El G6 envía mediciones de glucosa del sensor G6 (mediciones) a su dispositivo de visualización.



Elija la aplicación, el receptor o ambos

El receptor es un dispositivo médico especializado. Su dispositivo inteligente no lo es, aunque puede ejecutar la aplicación G6 en el mismo. ¿Por qué? Porque la aplicación podría pasar por alto una alarma/alerta solo porque está en un dispositivo inteligente. Por ejemplo, debido a la configuración del dispositivo inteligente, a que el dispositivo inteligente o la aplicación se apagan, la batería está baja, etc.

Use las siguientes pestañas para configurar la aplicación, el receptor o ambos

¿Quiere configurar ambos? Elija cuál configurar primero y vaya a esa pestaña. El último paso le muestra cómo configurar el segundo dispositivo de visualización. No utilice ambas pestañas.

Para conocer otras formas de aprender a configurar su G6:


- Mire el tutorial en línea en: dexcom.com/guides
- Comuníquese con Dexcom Care para obtener atención personalizada o para registrarse en seminarios web en línea gratuitos en: dexcom.com/dexcom-care o al 1.888.738.3646
- Para solicitar soporte técnico, visite dexcom.com/contact, o llame al 1.888.738.3646 (línea gratuita) o al 1.858.200.0200 (teléfono)




Su dispositivo inteligente




Receptor de Dexcom

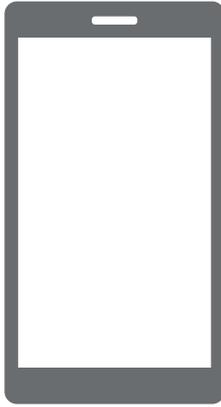

Su dispositivo inteligente

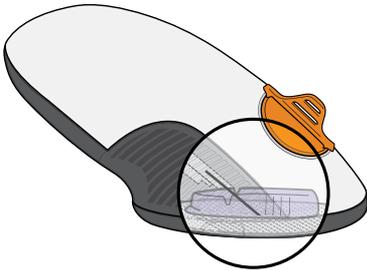

Aplicador con sensor integrado

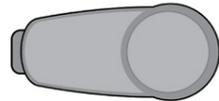

Transmisor

Configure la aplicación

Paso 1: Configure la aplicación

A Descargue y abra la aplicación Dexcom G6




B Siga las instrucciones de la pantalla para la configuración

1 Cuando se lo solicite, ingrese su:

- Número de serie (NS) de:

La caja del transmisor

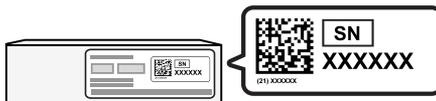


— 0 —

La parte trasera del transmisor



- El código del sensor del aplicador del sensor

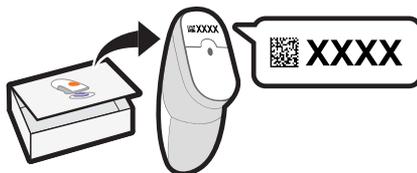

¿No hay un código en el sensor?

Consulte *Uso de su G6, Apéndice A Solución de problemas*

Luego, su G6 busca el transmisor. Mientras busca, no obtendrá mediciones ni alarmas/alertas de G6.

- 2** ¿Ve el temporizador de adaptación del sensor azul? Eso significa que su sensor se está acostumbrando a su cuerpo.

Durante la adaptación:

- No habrá mediciones ni alarmas/alertas de G6
- Mantenga siempre el dispositivo inteligente en un rango de 20 pies del transmisor



C Espere 2 horas

- Cuando haya terminado, toque **Aceptar** para ver la pantalla de inicio
- Ahora obtiene mediciones y alarmas/alertas de G6



Paso 2: Esté seguro usando la aplicación

Su dispositivo inteligente no es un dispositivo médico especializado. Para asegurarse de recibir siempre sus mediciones y alarmas/alertas, use esta información de seguridad:

Seguridad del sistema

- No confíe en el G6 hasta que sepa cómo usar el dispositivo y *Bluetooth* de su teléfono inteligente. *Bluetooth* debe estar activado para que el transmisor y la aplicación se vinculen. Lea las instrucciones del producto antes de usar el G6.



Seguridad de la aplicación

- Si el dispositivo inteligente o la aplicación G6 se cierran o no funcionan, no obtendrá mediciones ni alarmas/alertas. De vez en cuando, verifique que la aplicación G6 esté abierta y que *Bluetooth* esté activado.

Seguridad del dispositivo inteligente

- La aplicación utiliza la batería del dispositivo inteligente. Manténgalo cargado para recibir mediciones y alarmas/alertas.
- Cuando use auriculares, altavoces u otros dispositivos conectados por cable o por *Bluetooth*, pruebe el sistema para averiguar dónde sonarán sus alarmas/alertas. Pueden sonar en su dispositivo inteligente, en los auriculares, altavoces, entre otros; o en todos ellos. Cada producto es diferente.
- De vez en cuando, su dispositivo inteligente le pedirá que actualice su sistema operativo (SO). Antes de actualizar, verifique que el nuevo SO haya sido probado con la aplicación en dexcom.com/compatibility. Actualice siempre el SO manualmente y luego compruebe que la configuración del dispositivo sea la correcta. Las actualizaciones automáticas de la aplicación o el SO de su dispositivo pueden cambiar la configuración o cerrar la aplicación. Debe tener una conexión a Internet para actualizar.

- Compruebe que los altavoces y la pantalla de su dispositivo inteligente funcionan.
- No utilice un dispositivo inteligente pirateado (modificado sin autorización), ya que es posible que la aplicación Dexcom G6 no funcione correctamente en mismo.

Para obtener más información sobre la vida diaria con su G6, consulte *Uso de su G6*.

Paso 3, opcional: Configure el receptor

Encienda el receptor presionando el botón de encendido durante 2 a 3 segundos. Luego siga las instrucciones en pantalla.


No use la pestaña Configurar receptor. Esos pasos son para configurar el receptor antes de configurar la aplicación.

El receptor solo está disponible en inglés.






Receptor

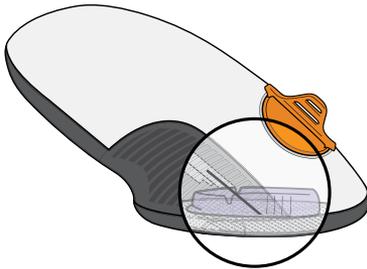

Aplicador con
sensor integrado

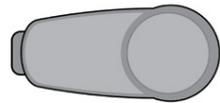

Transmisor

Configure el receptor

Paso 1: Configure el receptor

A Saque el receptor de la caja



B Encienda el receptor


Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 a 3 segundos



C Siga las instrucciones en pantalla

- 1 Cuando se lo solicite, ingrese su:
 - Código del sensor del aplicador del sensor que insertará

¿No hay un código en el sensor?
Consulte *Uso de su G6, Apéndice A Solución de problemas*

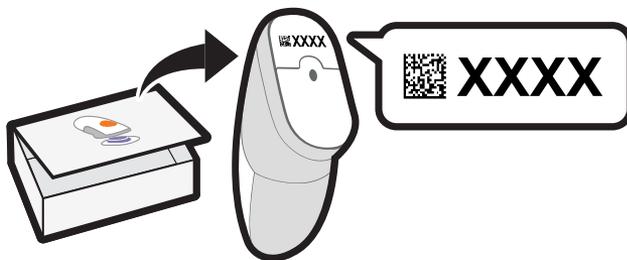

- Número de serie (NS) de:

La caja del transmisor



La parte trasera del transmisor



Luego, su G6 busca el transmisor. Mientras busca, no obtendrá mediciones ni alarmas/alertas de G6.


- 2** Habrá terminado con este paso cuando vea esta pantalla:




Paso 2: Use el aplicador para insertar el sensor incorporado

A Saque el aplicador con sensor incorporado de la caja del sensor

Materiales necesarios: aplicador (con el código que acaba de ingresar), transmisor y toallitas.

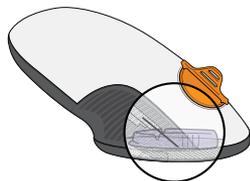


B Elija el sitio del sensor

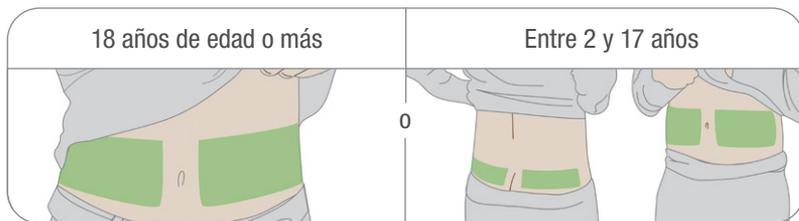


Busque un lugar en su vientre o en la parte superior de los glúteos donde tenga algo de relleno. Evite los huesos, la piel irritada, los tatuajes y las zonas que puedan recibir golpes.

C Use el aplicador para insertar el sensor incorporado


- 1 Lávese y séquese las manos. Limpie el lugar de aplicación con una toallita humedecida en alcohol.

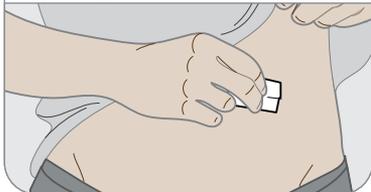


- 2 Retire el protector del adhesivo. No toque el adhesivo.

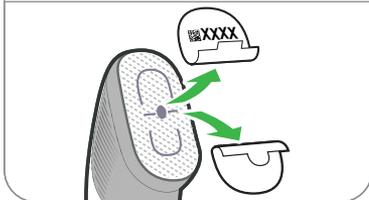

3 Coloque el aplicador sobre la piel.

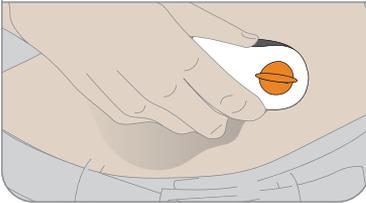


4 Doble y rompa la protección de seguridad para quitarlo.

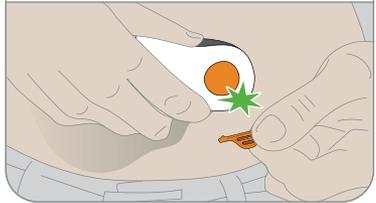

5 Presione el botón para insertar el sensor.



6 Quite el aplicador de la piel y deje puestas el parche y el soporte.

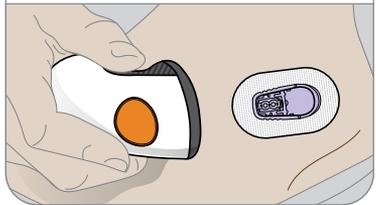


7 Deseche el aplicador. Siga las pautas locales sobre los componentes que estuvieron en contacto con la sangre.




Paso 3: Acople el transmisor

A Saque el transmisor de la caja

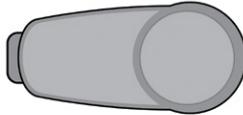


B Presione el transmisor para insertarlo


- 1** Limpie el transmisor con una toallita humedecida en alcohol.

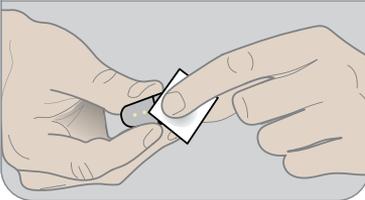


- 2** Inserte el transmisor en el soporte comenzando por la lengüeta.

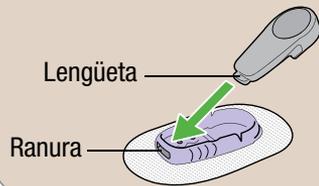

- 3** Presione el transmisor para insertarlo. Oirá un chasquido cuando quede en su lugar. Compruebe que el transmisor esté en posición horizontal y ajustado en el soporte.

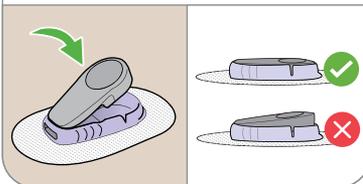

- 4** Frote 3 veces el parche.

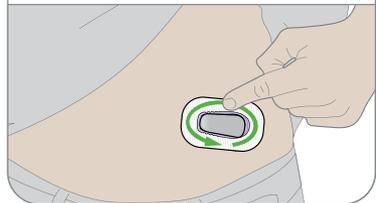

Paso 4: Sensor de inicio en el receptor

A Espere hasta 30 minutos para el emparejamiento

Durante el emparejamiento:

- No habrá mediciones ni alarmas/alertas de G6
- Mantenga siempre el receptor en un rango de 20 pies del transmisor



B Toque Start Sensor (Iniciar sensor) para comenzar la adaptación de 2 horas

Durante la adaptación, no obtendrá mediciones ni alarmas/alertas de G6



C Espere 2 horas

- Cuando termine, toque **Next** (Siguiente) para ir a la pantalla de inicio
- Ahora obtiene mediciones y alarmas/alertas de G6



Paso 5: Consulte *Uso de su G6*

Aprenda lo siguiente:

- Leer la pantalla de inicio
- Utilizar alarmas y alertas
- Tomar decisiones de tratamiento
- Solucionar problemas



Paso 6, opcional: Configure la aplicación

Descargue la aplicación Dexcom G6 en su dispositivo inteligente y ábrala. Luego siga las instrucciones en pantalla.

No use la pestaña Configurar aplicación. Esos pasos son para configurar la aplicación antes de configurar el receptor.



Capacitación

Mediante el uso de su Dexcom G6



Mirar en dexcom.com/links/g6/tutorial o leer en dexcom.com/guides

Con orientación personalizada



Comuníquese con nuestro equipo Dexcom CARE para recibir capacitación al 1.888.738.3646



Seguimiento

Dexcom Clarity® es una parte importante de su sistema Dexcom MCG. Mediante el uso de sus datos MCG, Clarity destaca sus patrones, tendencias y estadísticas de glucosa. Puede compartir datos de Clarity con su clínica y monitorear las mejoras entre las visitas. Conozca Clarity después de configurar su Dexcom MCG.

Cuando esté en casa



Inicie sesión en clarity.dexcom.com

Utilice su nombre de usuario actual de Dexcom o, de ser necesario, cree una cuenta.

Mientras esté fuera de casa



Reciba notificaciones semanales con la aplicación Dexcom Clarity

Notificaciones disponibles para usuarios móviles de Dexcom.

Dexcom

© 2022 Dexcom, Inc. Todos los derechos reservados.

Protegido por patentes dexcom.com/patents.

Dexcom, Dexcom CARE y Dexcom Clarity son marcas registradas de Dexcom, Inc. en los Estados Unidos y otros países. *Bluetooth* es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG. Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países. Android es una marca registrada propiedad de Alphabet Inc. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Dexcom



Dexcom, Inc.

6340 Sequence Drive

San Diego, CA 92121 USA

Teléfono: **1.858.200.0200**

Soporte técnico: **1.888.738.3646**

Sitio web: dexcom.com