

Pour commencer

G7




# Principes de base de G7

G7 affiche vos informations de glucose sur vos appareils d'affichage.


## Qu'y a-t-il dans la boîte du capteur

### Capteur et applicateur

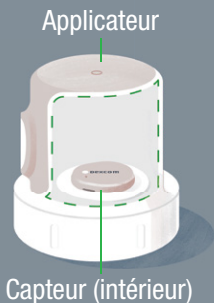

- Nous allons vous montrer pendant la configuration comment utiliser l'applicateur pour insérer le capteur intégré sous la peau.
- Le capteur envoie une valeur du glucose à vos appareils d'affichage toutes les 5 minutes.
- Le capteur dure jusqu'à 10 jours, avec une période de grâce de 12 heures.

### Patch de protection

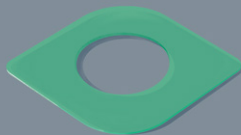

Après avoir inséré le capteur, utilisez le patch de protection pour aider à maintenir le capteur sur votre peau.

### Instructions

Lors de la configuration, utilisez les instructions d'insertion du capteur qui se trouvent dans l'application ou dans le lot avec le patch de protection.

# Principes de base de G7

G7 affiche vos informations de glucose sur vos appareils d'affichage.

## Quel appareil d'affichage configurez-vous ?

- **Appli**

Aller à la section : Configuration de l'application

- **Récepteur**

Aller à la section : Configuration du récepteur

## Utiliser jusqu'à 3 appareils d'affichage

Obtenez vos informations de glucose sur votre téléphone, votre montre connectée et sur le récepteur Dexcom.

Vous pouvez configurer l'appli sur le téléphone, le récepteur ou les deux, dans n'importe quel ordre.

L'application ou le récepteur peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Pour les smartphones et les systèmes d'exploitation pris en charge, allez sur : **[dexcom.com/compatibility](https://dexcom.com/compatibility)**

Revoir les Indications d'utilisation dans le *Guide de l'utilisateur G7*.

Tous les graphiques sont des représentations. Votre produit peut avoir une apparence différente.

# Configuration de l'application sur le téléphone

## 1. Démarrer

L'accès sécurisé à Internet est nécessaire pendant la configuration.

- Accédez à l'App Store ou au Google Play Store pour télécharger l'application Dexcom G7.




Dexcom G7

★★★★☆ 4.3 K

- Ouvrez l'application sur le téléphone.
- Connectez-vous ou créez un compte.

## 3. Démarrage du capteur

La minuterie de démarrage du capteur vous indique quand vous commencerez à recevoir des valeurs et des alertes.

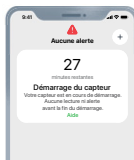

## 2. Configuration

- Suivez les instructions de l'application sur le téléphone pour la configurer.
- Pour obtenir des instructions sur l'insertion du capteur, suivez les instructions de l'application sur le téléphone ou consultez les instructions d'*Insertion du capteur* dans la boîte du capteur.
- Après l'insertion et l'appairage, respectez les directives locales pour l'élimination de l'applicateur et le recyclage de l'emballage Dexcom.

## 4. Votre session du capteur

Consultez le *Guide de l'utilisateur G7* pour en savoir plus.

# Configuration du récepteur

## 1. Insérer le capteur

- Vous devez insérer votre capteur avant de l'appairer au récepteur.
- Pour obtenir les instructions sur l'insertion du capteur, consultez les instructions d'*Insertion du capteur* dans la boîte du capteur.

Sélectionner



## 3. Démarrage du capteur

La minuterie de démarrage du capteur vous indique quand vous commencerez à recevoir des valeurs et des alertes.



## 2. Configuration du récepteur

- Appuyer sur le bouton **Sélectionner** pendant 3 à 5 secondes pour allumer le récepteur.
- Suivez les instructions du récepteur pour régler le récepteur. Insérez le capteur avant l'appairage.
- Après l'insertion et l'appairage, respectez les directives locales pour l'élimination de l'applicateur et le recyclage de l'emballage Dexcom.

## 4. Votre session du capteur

Consultez le *Guide de l'utilisateur G7* pour en savoir plus.

## Navigation du récepteur

L'écran du récepteur vous dit quel bouton utiliser.

- Pour faire défiler plus rapidement, maintenez enfoncée la touche **Faire défiler**.
- Pour passer au champ suivant, utilisez le bouton **Sélectionner**.

Défiler vers le haut  
Revenir



Sélectionner  
Défiler vers le bas



© 2024 Dexcom, Inc. Tous droits réservés.

Couvert par les brevets [dexcom.com/patents](https://dexcom.com/patents).

Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share, et tout autre logo et design de marque s'y référant sont soit des marques déposées, soit des marques de Dexcom Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays et régions. App Store est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque commerciale de Google LLC. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

# dexcomG7



Dexcom, Inc.  
6340 Sequence Drive  
San Diego, CA 92121 USA  
+1-858-200-0200  
[dexcom.com](https://dexcom.com)

Hors des États-Unis : Contactez  
votre représentant Dexcom local



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany