

Pour commencer


G7

Principes de base de G7

G7 affiche vos informations de glucose sur vos appareils d'affichage.


Qu'y a-t-il dans la boîte du capteur

Capteur et applicateur

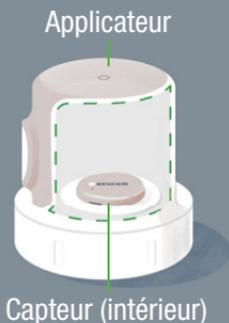

- Nous allons vous montrer pendant la configuration comment utiliser l'applicateur pour insérer le capteur intégré sous la peau
- Le capteur envoie une valeur du glucose à vos appareils d'affichage toutes les 5 minutes
- Le capteur dure jusqu'à 10 jours, avec une période de grâce de 12 heures

Patch de protection

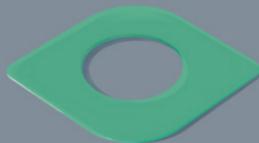

Après avoir inséré le capteur, utilisez le patch de protection pour aider à maintenir le capteur sur votre peau.

Instructions

Lors de la configuration, utilisez les instructions d'insertion du capteur qui se trouvent dans l'application ou dans le lot avec le patch de protection.

Principes de base de G7

G7 affiche vos informations de glucose sur vos appareils d'affichage.

Quel appareil d'affichage configurez-vous ?

- **Appli**

Aller à la section : Configuration de l'application

- **Récepteur**

Aller à la section : Configuration du récepteur

Utiliser jusqu'à 3 appareils d'affichage

Obtenez vos informations de glucose sur votre téléphone, votre montre connectée Apple Watch et sur le récepteur Dexcom.

Vous pouvez configurer l'appli, le récepteur ou les deux, dans n'importe quel ordre.

L'application ou le récepteur peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Pour les smartphones et les systèmes d'exploitation pris en charge, allez sur : **dexcom.com/compatibility**

Revoir les Indications d'utilisation dans le *Guide de l'utilisateur G7*.

Tous les graphiques sont des représentations. Votre produit peut avoir une apparence différente.

Configuration de l'application

1. Démarrer

L'accès sécurisé à Internet est nécessaire pendant la configuration.

- Accédez à l'App Store d'Apple ou au Google Play Store pour télécharger l'application Dexcom G7.



Dexcom G7

★★★★☆ 4.3 K

- Ouvrez l'application.
- Connectez-vous ou créez un compte.

3. Démarrage du capteur

La minuterie de démarrage du capteur vous indique quand vous commencerez à recevoir des valeurs et des alertes.



2. Configuration

- Suivez les instructions de l'application pour la configurer.
- Pour obtenir des instructions sur l'insertion du capteur, suivez les instructions de l'application ou consultez les instructions d'*Insertion du capteur* dans la boîte du capteur.
- Après l'insertion et l'appairage, respectez les directives locales pour l'élimination de l'applicateur et le recyclage de l'emballage Dexcom.

4. Votre session du capteur

Consultez le *Guide de l'utilisateur G7* pour en savoir plus.

Configuration du récepteur

1. Démarrer

Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pendant 3 à 5 secondes pour mettre le récepteur en marche.

Sélectionner



3. Démarrage du capteur

La minuterie de démarrage du capteur vous indique quand vous commencerez à recevoir des valeurs et des alertes.



2. Configuration

- Suivez les instructions sur les écrans du récepteur pour configurer le récepteur.
- Pour obtenir des instructions sur l'insertion du capteur, consultez les instructions d'*Insertion du capteur* dans la boîte du capteur.
- Après l'insertion et l'appairage, respectez les directives locales pour l'élimination de l'applicateur et le recyclage de l'emballage Dexcom.

4. Votre session du capteur

Consultez le *Guide de l'utilisateur G7* pour en savoir plus.

Navigation du récepteur

L'écran du récepteur vous dit quel bouton utiliser.

- Pour faire défiler plus rapidement, maintenez enfoncée la touche **Faire défiler**.
- Pour passer au champ suivant, utilisez le bouton **Sélectionner**.

Défiler
vers le haut
Revenir



Sélectionner
Défiler
vers le bas

Dexcom

© 2023 Dexcom, Inc. Tous droits réservés.

Couvert par les brevets [dexcom.com/patents](https://www.dexcom.com/patents).

Dexcom est une marque déposée de Dexcom, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. *Bluetooth* est une marque déposée propriété de Bluetooth SIG. Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque commerciale de Google LLC. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

dexcomG7



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
+1.858.200.0200
dexcom.com

Hors des États-Unis : Contactez
votre représentant Dexcom local

AW-00047-39 Rev 001 MT-00047-39
Rev Date 2023/02



2797



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



MDSS-UK RP Ltd.
6 Wilmslow Road, Rusholme
Manchester M14 5TP
United Kingdom