

Navodila za uporabo

Začnite tukaj

G7



# Osnove naprave G7

Pripomoček G7 prikazuje vaše podatke za glukozo na vaših prikazovalnih napravah.


## Kaj je v škatli s senzorjem?

### Senzor in aplikator



- Med nastavitvijo vam bomo pokazali, kako z aplikatorjem vstavite vgrajeni senzor pod kožo.
- Senzor vsakih 5 minut pošlje odčitek ravni glukoze vaši(m) prikazovalni(m) napravi(am).
- Senzor deluje do 10 dni z 12-urnim obdobjem odloga.

### Dodatni obliž

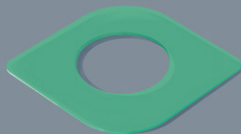

Potem ko ste vstavili senzor, lahko uporabite dodatni obliž, da senzor ostane na vaši koži.

### Navodila

Med nastavitvijo uporabite navodila za vstavljanje senzorja, ki jih najdete v aplikaciji ali v paketu z dodatnim obližem.

# Osnove naprave G7

Pripomoček G7 prikazuje vaše podatke za glukozo na vaših prikazovalnih napravah.

## Katero prikazovalno napravo nastavljate?

- **Aplikacija**

Pojdite v razdelek: Nastavitev aplikacije

- **Sprejemnik**

Pojdite v razdelek: Namestitev sprejemnika

## Uporabite do 3 prikazovalne naprave

Zajemite podatke za glukozo v telefon, pametno uro in sprejemnik Dexcom.

Aplikacijo na telefonu, sprejemnik ali oboje lahko nastavite v poljubnem vrstnem redu.

Aplikacija ali sprejemnik morda nista na voljo v vseh regijah.

Za podprte pametne telefone in operacijske sisteme obiščite spletno mesto: **[dexcom.com/compatibility](https://dexcom.com/compatibility)**

# Nastavitev aplikacije na telefonu

## 1. Začnite

Med nastavitvijo morate imeti varen dostop do interneta.

- Pojdite v trgovino App Store ali Google Play Store, da prenesete aplikacijo Dexcom G7.



Dexcom G7

★★★★☆ 4.3 K

- Odprite aplikacijo na telefonu.
- Prijavite se ali ustvarite račun.

## 3. Ogrevanje senzorja

Časovnik za ogrevanje senzorja vam pove, kdaj boste začeli prejemati odčitke in opozorila.



## 2. Nastavitev

- Za nastavitev aplikacije na telefonu sledite navodilom za aplikacijo.
- Za navodila o vstavljanju senzorja sledite navodilom aplikacije na telefonu ali si oglejte navodila *Vstavljanje senzorja* v škatli senzorja.
- Po vstavljanju in seznanitvi upoštevajte lokalne smernice za odlaganje aplikatorja in recikliranje embalaže Dexcom.

## 4. Vaša seja senzorja

Za več podatkov si oglejte *Uporabniški vodnik pripomočka G7*.

# Namestitev sprejemnika

## 1. Vstavite senzor

- Senzor morate vstaviti, preden ga seznanite s sprejemnikom.
- Za navodila glejte navodila Vstavljanje senzorja v škatli senzorja.



## 3. Ogrevanje senzorja

Časovnik za ogrevanje senzorja vam pove, kdaj boste začeli prejemati odčitke in opozorila.



## 2. Nastavite sprejemnik

- Pritisnite gumb **Izberi** in ga pridržite 3–5 sekund, da vklopite sprejemnik.
- Sledite navodilom na sprejemniku, da nastavite sprejemnik. Pred seznanitvijo vstavite senzor.
- Po vstavljanju in seznanitvi upoštevajte lokalne smernice za odlaganje aplikatorja in recikliranje embalaže Dexcom.

## 4. Vaša seja senzorja

Za več podatkov si oglejte *Uporabniški vodnik pripomočka G7*.

## Krmarjenje sprejemnika

Zaslon sprejemnika vam pove, kateri gumb uporabiti.

- Za hitrejšo drsenje pridržite tipko **Pomikanje**
- Za pomik na naslednje polje uporabite gumb **Izberi**





© 2024 Dexcom, Inc. Vse pravice pridržane.

Zajeto s patenti [dexcom.com/patents](https://dexcom.com/patents).

Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share ter vsi povezani logotipi in prepoznavni elementi blagovne znamke so bodisi registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Dexcom, Inc. v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. App Store je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah in regijah. Google Play je blagovna znamka družbe Google LLC. Vse druge znamke so last njihovih lastnikov.

# dexcomG7



Dexcom, Inc.  
6340 Sequence Drive  
San Diego, CA 92121 USA  
+1-858-200-0200  
**dexcom.com**

Izven ZDA: Stopite v stik  
s predstavnikom družbe Dexcom

**CE**  
2797

**EC REP**

MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany