

dexcom one

ZAPOČNITE OVDJE

Pregled
Postavljanje



Upute za upotrebu

Sadržaj

Osnovno o sustavu Dexcom ONE2

Što mi treba?

Kako funkcionira?

Postavljanje pametnog telefona.....5

Postavljanje sustava Dexcom ONE

Postavljanje prijamnika9

Postavljanje neobaveznog prijamnika za
Dexcom ONE

Umetanje senzora11

Odlučite gdje ćete umetnuti senzor

Umetanje senzora

Pričvršćivanje odašiljača

Prije početka

1. Pročitajte osnove o sustavu
Dexcom ONE.

2. Zatim prijedite na:

- *Postavljanje pametnog telefona* ako ga upotrebljavate.
- *Postavljanje prijamnika* ako upotrebljavate dodatni prijamnik.

Osnovno o sustavu Dexcom ONE

Što mi treba?

1. **Uređaj za prikaz rezultata** na kojem pregledavate podatke o glukozu
 - Upotrijebite svoj pametni telefon, dodatni prijamnik Dexcom ili oboje. (Pametni telefon nije uključen. Dodatni prijamnik dostupan je zasebno.)

Vaš pametni telefon



Prijamnik Dexcom




Za aktualni popis kompatibilnih pametnih uređaja otvorite **dexcom.com/compatibility**

Dodatni prijamnik možda nije dostupan u svim regijama.


2. Aplikator senzora s ugrađenim senzorom

- Senzor koji očitava glukozu umeće pod kožu.
- Postavlja plastični držač na vašu kožu.

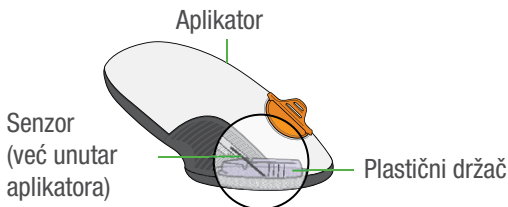


3. Odašiljač za višekratnu upotrebu

- Nakon stavljanja senzora na kožu, umetnut ćete sivi odašiljač u plastični držač.
- Odašiljač šalje očitavanja glukozu sa senzora na pametni telefon ili prijamnik.

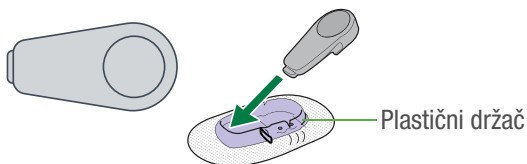

Kako funkcionira?

Nakon što postavite Dexcom ONE, odašiljač šalje očitavanja senzora na vaš uređaj za prikaz rezultata.

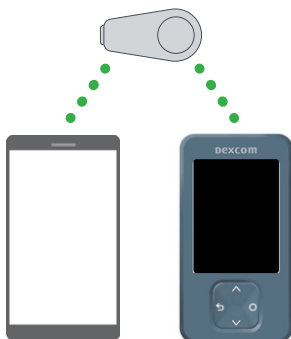

Grafičke slike samo su za prikaz. Vaš proizvod može izgledati drugačije.

Kritične sigurnosne obavijesti.

Upozorenja sustava Dexcom ONE

- ⚠ Nema upozorenja za glukozu osim ako ih uključite.**
 - Uključite upozorenja tijekom postavljanja kako biste dobivali upozorenja za glukozu i upozorenja sustava kad zagrijavanje senzora završi.
- ⚠ Upozorenja sustava Dexcom ONE NEĆE nadjačati postavke pametnog telefona.**
 - Upozorenja za visoku ili nisku glukozu **NEĆETE** čuti ako je zvuk telefona utišan (zvuk je isključen).
 - Upozorenja ćete čuti SAMO kad je zvuk pametnog telefona uključen.
 - Provjerite postavke pametnog telefona kako ne biste propustili neko upozorenje.
- ⚠ Upozorenja sustava Dexcom ONE NEĆE nadjačati postavke prijamnika.**
 - Ako je prijamnik postavljen na vibriranje, nećete čuti upozorenja za visoku ili nisku glukozu.
 - Uključite zvuk prijamnika kako biste čuli upozorenja.

Sigurno upotrebljavajte sustav

Pročitajte sve upute o proizvodu prije upotrebe sustava Dexcom ONE, uključujući izjave o sigurnosti u korisničkom vodiču za Dexcom One.

Početak

Koji uređaj za prikaz rezultata upotrebljavate?

Pametni telefon



Otvorite **Postavljanje pametnog telefona**, str. 5.

Prijamnik



Otvorite **Postavljanje prijamnika**, str. 9.

Postavljanje pametnog telefona

Samo za postavljanje pametnog telefona.
Prijeđite na str. 9 za prijamnik.

1. korak: Postavljanje sustava Dexcom ONE

Postavite aplikaciju **prije** umetanja senzora.

1. Otvorite trgovinu aplikacija.
2. Pretražite Dexcom ONE.



3. Preuzmite aplikaciju Dexcom ONE i otvorite je.
4. Kad je aplikacija otvorena, pratite upute na zaslonu, uključujući upute o uključivanju upozorenja.
5. Tijekom cijelog postupka postavljanja potreban je pristup internetu.

! Nema upozorenja za glukozu, osim ako ih uključite.

Uključite upozorenja kada se od vas to zatraži kako biste dobivali upozorenja za glukozu i upozorenja sustava kada zagrijavanje senzora završi.

Tijekom postavljanja aplikacija će od vas zatražiti sljedeće:


- unesite serijski broj odašiljača (SN), ručno ili snimanjem fotografije

serijski broj nalazi se na poledini odašiljača i kutije



- unesite šifru senzora koji se nalazi na senzoru koji umećete, ručno ili snimanjem fotografije

Šifra senzora nalazi se na aplikatoru senzora.

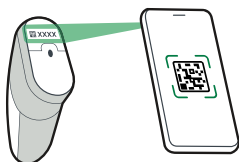

2. korak: Zagrijavanje senzora

Nakon što postavite senzor, treba mu vremena da se prilagodi vašem tijelu. To traje otprilike dva sata. Pametni telefon držite unutar 6 metara od odašiljača.

Očitavanja senzora ili upozorenja **NEĆETE** primiti dok zagrijavanje senzora ne završi.

! Ako niste uključili upozorenja tijekom postavljanja, uključite ih sada da biste primali upozorenja kada zagrijavanje senzora završi.

Pričekajte dva sata.

Kada zagrijavanje senzora završi, primit ćete očitavanja senzora.

3. korak: Provjera postavki telefona

 **Upozorenja sustava Dexcom ONE NEĆE nadjačati postavke pametnog telefona.**

- Upozorenja za visoku ili nisku glukozu **NEĆETE** čuti ako je zvuk telefona utišan (zvuk je isključen).
 - Upozorenja ćete čuti SAMO kad je zvuk pametnog telefona uključen.
 - Provjerite postavke pametnog telefona kako ne biste propustili neko upozorenje.
-

4. korak: Uključivanje upozorenja

Ako niste uključili upozorenja tijekom postavljanja, to možete učiniti bilo kada.

1. Dodirnite **Postavke > Upozorenja**.
2. Dodirnite upozorenje koje želite postaviti.
3. Slijedite upute na zaslonu.
4. Vratite se na **Postavke > Upozorenja** da biste postavili drugo upozorenje.
5. Dodirnite ikonu za **glukozu**  pri dnu zaslona da biste se vratili na početni zaslon.

Obavijest o sigurnosti pametnog telefona

Vaš pametni telefon **NIJE** namjenski medicinski proizvod. Da biste dobivali očitavanja senzora i upozorenja:

- Nikako **NEMOJTE** upotrebljavati hakirani (neovlašteno izmijenjen ili neovlašteno otključan) pametni telefon jer Dexcom ONE možda neće ispravno funkcionirati.
- *Bluetooth*[®] mora biti uključen da bi odašiljač i aplikacija mogli komunicirati.
- **NEMOJTE** se oslanjati na Dexcom ONE dok ne naučite upotrebljavati njega i *Bluetooth* na pametnom telefonu.
- Provjerite rade li ispravno zvučnici i zaslon pametnog telefona.

- Pri upotrebi *Bluetootha* ili uključenih slušalica, zvučnika itd. testirajte sustav kako biste saznali gdje će se upozorenja oglasiti. Mogla bi se oglasiti na vašem pametnom telefonu, putem slušalica ili zvučnika ili svega navedenog.
 - Aplikacija upotrebljava bateriju pametnog telefona. Da biste dobivali očitavanja senzora i upozorenja, punite svoj telefon.
 - Ako se vaš pametni telefon ili aplikacija Dexcom ONE zatvori ili ne funkcionira, **NEĆETE** primati očitavanja ili upozorenja. Povremeno provjerite je li aplikacija otvorena i je li *Bluetooth* uključen.
-

Pročitajte vodič za korisnike sustava Dexcom ONE

Saznajte kako:

- sigurno upotrebljavati sustav
- čitati početni zaslon
- postaviti i upotrebljavati upozorenja
- donositi odluke o liječenju
- zaustaviti rad senzora
- pokrenuti ciklus rada novog senzora
- ponovno upotrijebiti odašiljač
- otkloniti poteškoće

5. korak: Postavljanje (neobaveznog) prijamnika za Dexcom ONE

1. Držite pritisnutim gumb **Odaberi** od tri do pet sekundi.
2. Pratite upute na zaslonu, uključujući upute o uključivanju upozorenja.



gumb **Odaberi**

Dodatni prijamnik možda nije dostupan u svim regijama.

Postavljanje prijamnika

1. korak: Postavljanje neobaveznog prijamnika za Dexcom ONE

1. Držite pritisnutim gumb **Odaberi** od tri do pet sekundi da biste uključili prijamnik.



gumb **Odaberi**

2. Krećite se pomoću gumba. Na zaslonu će pisati koji gumb trebate upotrijebiti.

Pomicanje gore

Idi natrag



Odaberi

Pomaknite se
prema dolje

3. Pratite upute na zaslonu za postavljanje prijamnika, uključujući upute o uključivanju upozorenja.



! Nema upozorenja za glukozu osim ako ih uključite.

Uključite upozorenja kada se od vas to zatraži kako biste dobivali upozorenja za glukozu i upozorenja sustava kada zagrijavanje senzora završi.

Tijekom postavljanja prijamnik će od vas zatražiti sljedeće:

unesite serijski broj odašiljača.

Pronađite serijski broj na odašiljaču ili kutiji odašiljača.

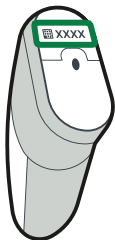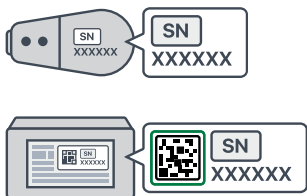

Unesite šifru senzora koji ste umetnuli. Ne upotrebljavajte šifru s drugog senzora.


Šifra senzora nalazi se na aplikatoru senzora.

4. Kada se prikaže ovaj zaslon, odložite prijamnik. Pomoću uputa u ovom vodiču umetnite senzor i pričvrstite odašiljač.



2. korak: Umetanje senzora

A. Odlučite gdje ćete umetnuti senzor

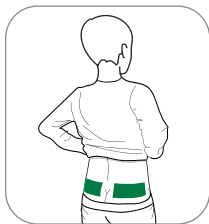

Samo djeca u dobi od 2 do 17 godina mogu umetnuti senzor na gornji dio stražnjice.




Sve osobe u dobi od dvije godine i starije mogu ga umetnuti u trbuh ili nadlaktice.

Izbjegavajte:

- koščata područja
- nadraženu kožu
- tetovaže
- područja izložena udaranju

B. Umetanje senzora

1

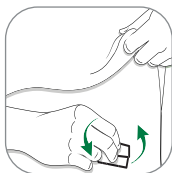

Operite ruke i mjesto postavljanja sapunom. Posušite.

Istrljajte mjesto za postavljanje senzora alkoholnim tupferom.

2



Odljepite obje zaštite s ljepljive podloge na aplikatoru. Ne dodirujte ljepljivu površinu.

Sačuvajte zaštitu. Na njoj se prikazuje kod senzora. **Nemojte stavljati ništa na ljepljivu podlogu.** Ljepljiva podloga ide na vašu kožu.

3



Aplikator stavite na kožu **prije** nego što odlomite zaštitu.

4



Preklopите i odlomite narančastu zaštitu. **Nemojte zakretati.**

5



Pritisnite narančastu tipku za umetanje senzora.

6



Uklonite aplikator s kože, a ostavite ljepljivu podlogu i držač.

7



Odložite aplikator u otpad. Prilikom odlaganja slijedite lokalne smjernice za dijelove koji dolaze u kontakt s krvi.


3. korak: Pričvršćivanje odašiljača

1




Očistite odašiljač alkoholnim tupferom.

2

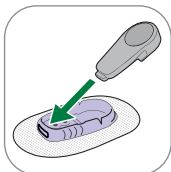


Umetnite odašiljač u držač s jezičcem prema naprijed.

3

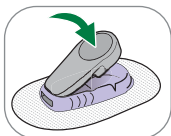


Utisnite odašiljač. Čut ćete klik.

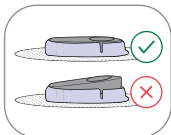

Provjerite je li do kraja utisnut u držač.

4

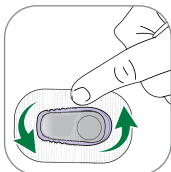

Pritisnite slobodni dio ljepljive podloge tri puta za bolje prianjanje.

4. korak: Uparivanje odašiljača

1. **NAKON** što umetnete senzor i pričvrstite odašiljač pritisnite gumb **Odaberi** da biste pokrenuli uparivanje prijamnika i odašiljača.



gumb **Odaberi**

2. Pričekajte dok se odašiljač ne upari s prijamnikom. Uparivanje može potrajati do 30 minuta.
3. Prijamnik držite unutar 6 metara od odašiljača.

5. korak: Zagrijavanje senzora

Nakon što postavite senzor, treba mu vremena da se prilagodi vašem tijelu. To traje otprilike dva sata. Prijamnik držite unutar 6 metara od odašiljača.

Očitavanja senzora ili upozorenja **NEĆETE** primiti dok zagrijavanje senzora ne završi.

 Ako niste uključili upozorenja tijekom postavljanja, **uključite ih sada** da biste primali upozorenja kada zagrijavanje senzora završi.

Pričekajte dva sata.

Kada zagrijavanje senzora završi, primit ćete očitavanja senzora.

6. korak: Provjera postavki prijamnika

 Upozorenja sustava Dexcom ONE neće nadjačati postavke prijamnika.

- Ako je prijamnik postavljen na vibriranje, nećete čuti upozorenja za visoku ili nisku glukozu.
- Provjera postavki prijamnika: Idite na **Izbornik > Postavke > Zvukovi upozorenja**.
- Uključite zvuk prijamnika kako biste čuli upozorenja.

7. korak: Uključivanje upozorenja

 Nema upozorenja za glukozu osim ako ih uključite.

Ako niste uključili upozorenja tijekom postavljanja, to možete učiniti bilo kada. Na prijamniku:

1. Idite na **Izbornik > Postavke > Upozorenja**.
2. Odaberite upozorenje koje želite postaviti.
3. Slijedite upute na zaslonu.
4. Vratite se na **Izbornik > Postavke > Upozorenja** da biste postavili drugo upozorenje.

8. korak: Postavljanje sustava Dexcom ONE (izborno)

1. Otvorite trgovinu aplikacija na pametnom telefonu.
 2. Pretražite Dexcom ONE.
 3. Preuzmite aplikaciju Dexcom ONE i otvorite je.
 4. Pratite upute na zaslonu, uključujući upute o uključivanju upozorenja.
-

Pročitajte vodič za korisnike sustava Dexcom ONE

Saznajte kako:

- sigurno upotrebljavati sustav
- čitati početni zaslon
- postaviti i upotrebljavati upozorenja
- donositi odluke o liječenju
- pokrenuti ciklus rada novog senzora
- ponovno upotrijebiti odašiljač
- otkloniti poteškoće

© 2022. Dexcom, Inc. Sva prava pridržana.

Obuhvaćeno patentima **dexcom.com/patents**.

Dexcom, Dexcom ONE i Dexcom Care registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dexcom, Inc. u Sjedinjenim Državama, a moguće i/ili u drugim zemljama.

Bluetooth je zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG. Apple je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. registriran u Sjedinjenim Američkim Državama i u drugim zemljama. Android je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Alphabet Inc. Svi drugi znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.

Dexcom



Dexcom, Inc.

6340 Sequence Drive

San Diego, CA 92121 USA

+1.858.200.0200

dexcom.com

Izvan SAD-a: obratite se lokalnom
predstavniku tvrtke Dexcom



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover, Germany



AW-00018-27 REV001 MT-00018-27

Rev Date: 2022/08