

Dexcom ONE

POUR COMMENCER

Aperçu
Configuration



Mode d'emploi



Table des matières

Principes de base de Dexcom ONE.....2

De quoi ai-je besoin ?

Comment cela fonctionne ?

Configurer le smartphone.....5

Configurer l'application Dexcom ONE

Configurer le récepteur.....9

Configurer le récepteur Dexcom ONE en option

Insérer le capteur10

Décider où insérer le capteur

Insérer le capteur

Fixer le transmetteur

Avant de commencer

1. Lisez les principes de base de Dexcom ONE.

2. Puis, allez sur :

- *Configurer le smartphone*, si vous utilisez votre téléphone.
- *Configurer le récepteur*, si vous utilisez le récepteur en option.

Principes de base de Dexcom ONE

De quoi ai-je besoin ?

1. **Un appareil d'affichage** pour obtenir vos informations de glycémie
 - Utilisez votre smartphone, le récepteur Dexcom en option, ou les deux. (Smartphone non inclus. Le récepteur facultatif est disponible séparément.)

Votre smartphone



Récepteur Dexcom




Pour une liste à jour des appareils connectés compatibles, allez sur dexcom.com/compatibility

Le récepteur facultatif peut ne pas être disponible dans toutes les régions.


2. Applicateur du capteur avec capteur intégré

- Insère un capteur sous votre peau qui reçoit les lectures de glucose.
- Applique un support en plastique sur la peau.

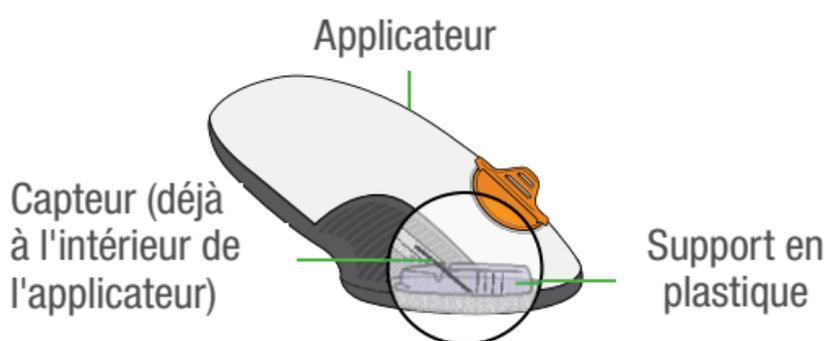


3. Transmetteur réutilisable

- Après avoir appliqué le capteur sur votre peau, enclenchez un transmetteur gris dans le support en plastique.
- Le transmetteur envoie les lectures de glucose du capteur à votre smartphone.

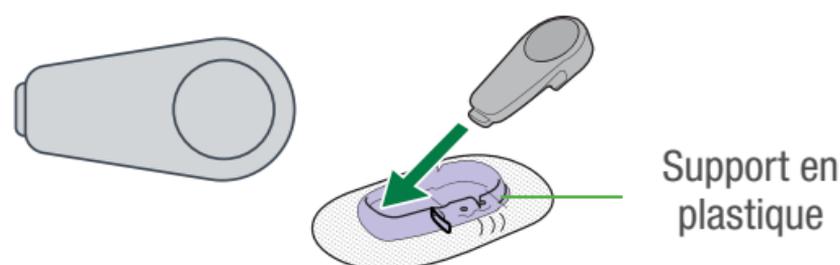

Comment cela fonctionne ?

Une fois que vous l'avez configuré Dexcom ONE, le transmetteur envoie les lectures du capteur à votre appareil d'affichage.

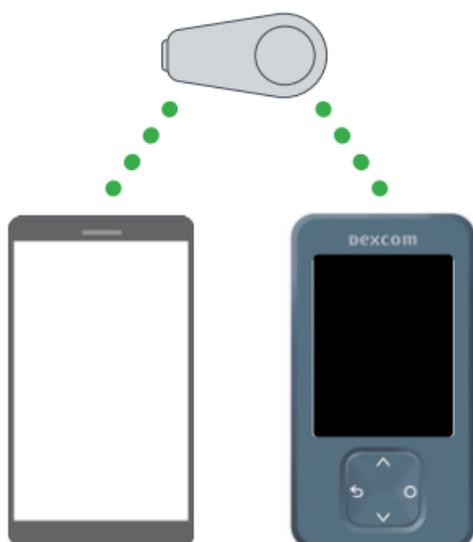

Tous les graphiques sont des représentations. Votre produit peut avoir une apparence différente.

Notifications de sécurité critiques !

Alertes de Dexcom ONE

! Aucune alerte de glycémie sauf si vous les activez.

- Activez les alertes pendant la configuration pour obtenir les alertes de glycémie et du système lorsque le préchauffage du capteur est terminé.

! Les alertes de Dexcom ONE n'annuleront PAS les paramètres de votre smartphone.

- Vous n'entendrez **PAS** les alertes de glucose élevé ou bas, si votre téléphone est réglé sur silencieux (son désactivé).
- Vous entendrez les alertes **UNIQUEMENT** si le son de votre smartphone est activé.
- Vérifiez les paramètres de votre smartphone afin de ne manquer aucune alerte.

! Les alertes de Dexcom ONE n'annuleront PAS les paramètres de votre récepteur.

- Si votre récepteur est réglé pour vibrer, vous n'entendrez pas les alertes de glycémie élevée ou basse.
- Activez le son du récepteur pour entendre les alertes.

Utiliser votre système en toute sécurité

Lisez toutes les instructions du produit avant d'utiliser Dexcom ONE, y compris les déclarations de sécurité dans le Guide de l'utilisateur de Dexcom ONE.

Démarrer

Quel appareil d'affichage utilisez-vous ?

Smartphone



Consultez [Configurer le smartphone](#), p. 5.

Récepteur



Consultez [Configurer le récepteur](#), p. 8.

Configurer le smartphone

Configuration du smartphone uniquement. Allez à la page 8 pour le récepteur.

Étape 1 : Configurer l'application Dexcom ONE

Configurez l'application **avant** d'insérer le capteur.

1. Allez à l'App store.
2. Recherchez Dexcom ONE.



3. Téléchargez et ouvrez l'application Dexcom ONE.
4. Suivez les instructions à l'écran avec l'application ouverte, y compris les instructions pour activer les alertes.
5. L'accès à l'Internet est requis pendant toute la configuration.

 **Aucune alerte de glycémie sauf si vous les activez.**

Activez les alertes lorsque vous y êtes invité pour obtenir les alertes de glycémie et du système lorsque le préchauffage du capteur est terminé.

Pendant la configuration l'application vous invitera à :


- saisir le n° de série du transmetteur manuellement ou en prenant une photo ;

Le n° de série se trouve à l'arrière du transmetteur et du boîtier.



- saisir le code du capteur provenant du capteur inséré, manuellement ou en prenant une photo.

Le code du capteur se trouve sur l'appliqueur.

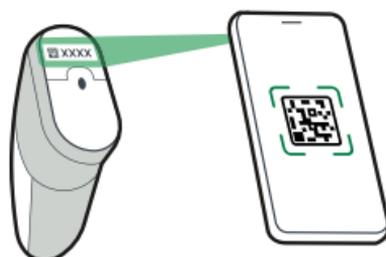

Étape 2 : Préchauffage du capteur

Après la configuration, le capteur a besoin de temps pour s'adapter à votre corps. Cela prend environ 2 heures. Gardez toujours votre smartphone à moins de 6 mètres du transmetteur.

Vous ne recevrez **PAS** de lecture ni d'alerte du capteur jusqu'à ce que le préchauffage soit terminé.

 Si vous n'avez pas activé les alertes pendant la configuration, **faites-le maintenant** pour recevoir les alertes lorsque le préchauffage du capteur est terminé.

Attendez 2 heures

Lorsque le préchauffage du capteur est terminé, vous recevrez les lectures du capteur.

Étape 3 : Vérifier les réglages de téléphone

 **Les alertes de Dexcom ONE n'annuleront PAS les paramètres de votre smartphone.**

- Vous n'entendrez **PAS** les alertes de glucose élevé ou bas, si votre téléphone est réglé sur silencieux (son désactivé).
 - Vous entendrez les alertes **UNIQUEMENT** si le son de votre smartphone est activé.
 - Vérifiez les paramètres de votre smartphone afin de ne manquer aucune alerte.
-

Étape 4 : Activer les alertes

Si vous n'avez pas activé les alertes pendant la configuration, vous pouvez le faire à tout moment.

1. Appuyez sur **Réglages > Alertes**.
2. Appuyez sur l'alerte que vous souhaitez définir.
3. Suivez les instructions à l'écran.
4. Revenez à **Réglages > Alertes** pour en définir une autre.
5. Appuyez sur l'icône **Glucose** en bas  de l'écran pour revenir à l'écran d'accueil.

Notifications de sécurité du smartphone

Votre smartphone n'est **PAS** un dispositif médical dédié. Pour vous assurer que vous recevez les lectures et alertes du capteur :

- N'utilisez **PAS** un smartphone piraté (jailbreaké ou rooté), car Dexcom ONE ne fonctionnera sans doute pas correctement.
- *Bluetooth*[®] doit être allumé pour que votre transmetteur et votre application communiquent.
- Ne vous fiez **PAS** à Dexcom ONE jusqu'à ce que vous compreniez comment l'utiliser et utiliser *Bluetooth* sur votre smartphone.
- Vérifiez que le(s) haut-parleur(s) et l'écran de votre smartphone fonctionnent.
- Lorsque vous utilisez *Bluetooth* ou des écouteurs, haut-parleurs, etc. branchés, testez le système pour savoir où vos alertes retentissent. Elles peuvent retentir sur votre smartphone, les écouteurs ou les haut-parleurs, ou sur les deux.
- L'application se sert de la batterie du smartphone. Gardez votre téléphone chargé pour recevoir les lectures et les alertes.
- Si votre smartphone ou l'application Dexcom ONE se ferme ou ne fonctionne pas, vous ne recevrez **PAS** les lectures et les alertes. Vérifiez de temps en temps que votre application est ouverte et que *Bluetooth* est allumé.

Lire le Guide de l'utilisateur Dexcom ONE

Apprenez ce qui suit :

- Utiliser votre système en toute sécurité
- Consulter votre écran d'accueil
- Définir et utiliser les alertes
- Prendre des décisions de traitement
- Terminer une session de capteur
- Démarrer une nouvelle session de capteur
- Réutiliser votre transmetteur
- Dépanner des problèmes

Étape 5 : Configurer le récepteur Dexcom ONE (facultatif)

1. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pendant 3 à 5 secondes.
2. Suivez les instructions à l'écran, y compris les instructions pour activer les alertes.



Bouton
Sélectionner

Le récepteur facultatif peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

Configurer le récepteur

Étape 1 : Configurer le récepteur Dexcom ONE en option

1. Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant 3 à 5 secondes pour mettre le récepteur en marche.




Bouton
Sélectionner

2. Utilisez les boutons pour vous déplacer. L'écran vous dira quel bouton utiliser.

Défiler vers le haut

Revenir

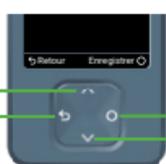

Sélectionner

Défiler vers le bas

3. Suivez les instructions à l'écran pour configurer le récepteur, y compris les instructions pour activer les alertes.


! Aucune alerte de glycémie sauf si vous les activez.

Activez les alertes lorsque vous y êtes invité pour obtenir les alertes de glycémie et du système lorsque le préchauffage du capteur est terminé.

Pendant la configuration le récepteur vous invitera à :

saisir le numéro de série du transmetteur ;

Trouvez le numéro de série sur le transmetteur ou sur son boîtier.

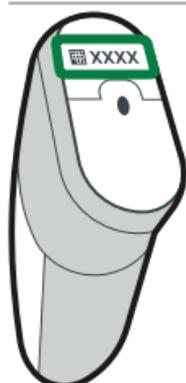

saisir le code du capteur sur le capteur que vous insérez. N'utilisez pas le code d'un autre capteur.


Le code du capteur se trouve sur l'appliqueur.

4. Quand cet écran s'affiche, mettez de côté votre récepteur. Suivez les instructions de ce guide pour insérer le capteur et fixer le transmetteur.



Étape 2 : Insérer le capteur

A. Décider où insérer le capteur

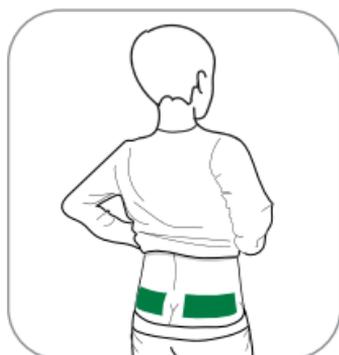

Ceux de 2 à 17 ans uniquement peuvent utiliser le haut des fesses.



Toutes les personnes de 2 ans et plus peuvent utiliser l'abdomen ou l'arrière du haut du bras.

À éviter :

- Zones osseuses
- Peau irritée
- Tatouages
- Zones exposées aux chocs


B. Insérer le capteur

1



Lavez-vous les mains et le site du capteur à l'eau savonneuse. Séchez.

2

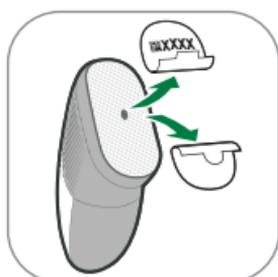

Frottez le site du capteur avec une lingette imprégnée d'alcool.

Décollez les deux papiers adhésifs de l'applicateur. Ne touchez pas l'adhésif. **Conservez les papiers.** Ils vous montrent le code du capteur. **Ne placez rien sur l'adhésif.** L'adhésif se place sur la peau.

3



Placez l'applicateur sur la peau **avant** de retirer le dispositif de sécurité.

4



Pliez et retirez le dispositif de sécurité orange. **Ne le tordez pas.**

5



Appuyez sur le bouton orange pour insérer le capteur.

6



Retirez l'applicateur de la peau en laissant le patch et le support.

7



Jetez l'applicateur. Respectez les consignes locales relatives à l'élimination des composants entrés en contact avec du sang.

Étape 3 : Fixer le transmetteur

1




Nettoyez le transmetteur avec une lingette imprégnée d'alcool.

2




Insérez le transmetteur, avec la languette en premier, dans le support.

3

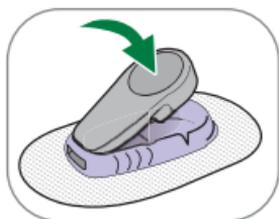


Enclenchez le transmetteur en position. Vous entendrez un clic.

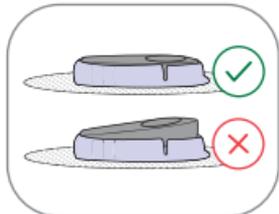

Vérifiez qu'il est emboîté à plat dans son support.

4

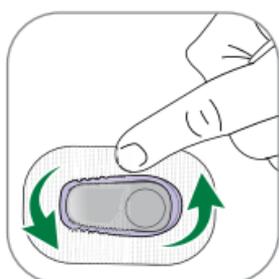

Frottez autour du patch 3 fois pour qu'il se colle.

Étape 4 : Appairer le transmetteur

1. **APRÈS** avoir inséré le capteur et connecté le transmetteur, appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour commencer l'appairage du transmetteur au récepteur.



Bouton
Sélectionner

2. Attendez pendant que le transmetteur s'appaire au récepteur. Cela peut prendre jusqu'à 30 minutes.
3. Gardez le récepteur à moins de 6 mètres du transmetteur.

Étape 5 : Préchauffage du capteur

Après la configuration, le capteur a besoin de temps pour s'adapter à votre corps. Cela prend environ 2 heures. Gardez le récepteur à moins de 6 mètres du transmetteur.

Vous ne recevrez **PAS** de lecture ni d'alerte du capteur jusqu'à ce que le préchauffage soit terminé.

 Si vous n'avez pas activé les alertes pendant la configuration, **faites-le maintenant** pour recevoir les alertes lorsque le préchauffage du capteur est terminé.

Attendez 2 heures

Lorsque le préchauffage du capteur est terminé, vous recevrez les lectures du capteur.

Étape 6 : Vérifier les paramètres du récepteur

 Les alertes de Dexcom ONE n'annuleront pas les paramètres de votre récepteur.

- Si votre récepteur est réglé pour vibrer, vous n'entendrez pas les alertes de glycémie élevée ou basse.
- Pour vérifier les réglages de son de votre récepteur : Accédez à **Menu > Réglages > Sons d'alerte**.
- Activez le son du récepteur pour entendre les alertes.

Étape 7 : Activer les alertes

 Aucune alerte de glycémie sauf si vous les activez.

Si vous n'avez pas activé les alertes pendant la configuration, vous pouvez le faire à tout moment. Dans votre récepteur :

1. Accédez à **Menu > Réglages > Alertes**.
2. Sélectionnez l'alerte que vous souhaitez définir.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran.
4. Revenez à **Menu > Réglages > Alertes** pour en définir une autre.

Étape 8 : Configurer l'application Dexcom ONE (facultatif)

1. Allez à l'App store de votre smartphone.
 2. Recherchez Dexcom ONE.
 3. Téléchargez et ouvrez l'application Dexcom ONE.
 4. Suivez les instructions à l'écran, y compris les instructions pour activer les alertes.
-

Lire le Guide de l'utilisateur Dexcom ONE

Apprenez ce qui suit :

- Utiliser votre système en toute sécurité
- Consulter votre écran d'accueil
- Définir et utiliser les alertes
- Prendre des décisions de traitement
- Démarrer une nouvelle session de capteur
- Réutiliser votre transmetteur
- Dépanner des problèmes

© 2021 Dexcom, Inc. Tous droits réservés.

Couvert par les brevets **dexcom.com/patents**.

Dexcom, Dexcom ONE et Dexcom Care sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. *Bluetooth* est une marque déposée propriété de Bluetooth SIG. Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque déposée propriété d'Alphabet Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Dexcom



Dexcom, Inc.

6340 Sequence Drive

San Diego, CA 92121 USA

+1.858.200.0200

dexcom.com

Hors des États-Unis : contactez votre
représentant Dexcom local.



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover, Germany



AW-00018-40 Rev 001 MT00018-40

Rev Date : 2022/04