

Dexcom ONE

OPERAZIONI INIZIALI

Panoramica
Configurazione



Istruzioni per l'uso



Contenuti

Conoscenze di base su Dexcom ONE2

Di cosa ho bisogno?

Come funziona?

Configura smartphone5

Configura l'app Dexcom ONE

Configura il ricevitore9

Configura il ricevitore Dexcom ONE opzionale

Inserisci il sensore11

Decidi dove inserire il tuo sensore

Inserisci il sensore

Collega il trasmettitore

Prima di iniziare

1. Leggi le nozioni di base su Dexcom ONE.

2. Quindi, vai a:

- *Configura smartphone*, se utilizzi il tuo telefono.
- *Configura il ricevitore*, se utilizzi il ricevitore opzionale.

Conoscenze di base su Dexcom ONE

Di cosa ho bisogno?

1. **Un dispositivo di visualizzazione** per ottenere le informazioni sulla glicemia
 - Usa il tuo smartphone, il ricevitore Dexcom opzionale o entrambi. (Smartphone non incluso. Ricevitore opzionale disponibile separatamente.)

Il tuo smartphone



Ricevitore Dexcom




Per un elenco aggiornato degli smart device compatibili, consulta il sito dexcom.com/compatibility

Il ricevitore opzionale potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

2. Inserisce sotto la pelle un sensore che rileva le tue letture glicemiche.


- Inserisci un sensore sotto la pelle che rileva le tue letture glicemiche.
- Applica un supporto di plastica sopra la pelle.

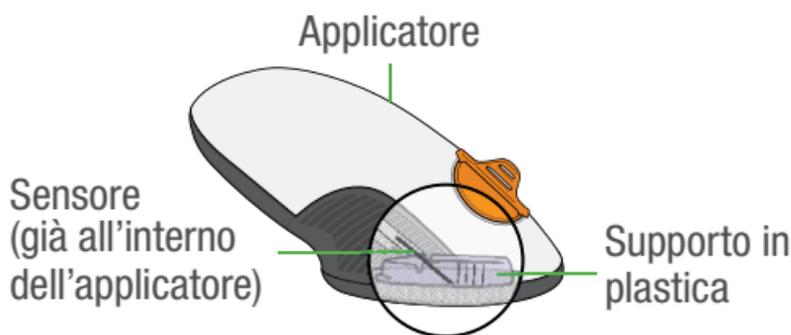

3. Trasmettitore riutilizzabile


- Dopo aver applicato il sensore sulla pelle, dovrai inserire un trasmettitore grigio nell'apposito supporto di plastica.

- Il trasmettitore invia le letture glicemiche del sensore allo smartphone o al ricevitore.

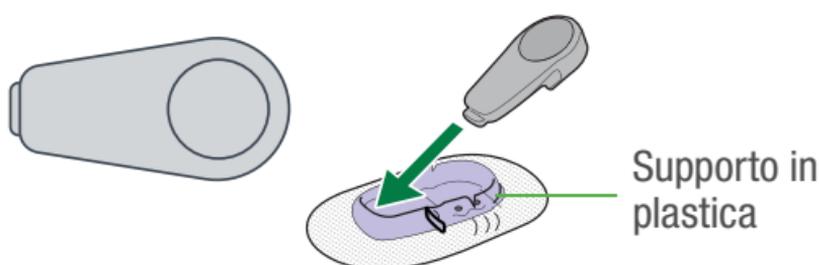

Come funziona?

Dopo aver configurato Dexcom ONE, il trasmettitore invia le letture del sensore al tuo dispositivo di visualizzazione.

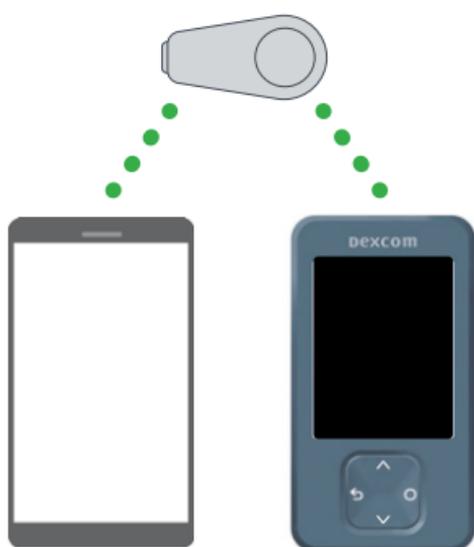

*Le immagini sono puramente rappresentative.
Il prodotto potrebbe avere un aspetto diverso.*

Avvisi di sicurezza critici!

Avvisi di Dexcom ONE

- ⚠ Non riceverai alcun avviso relativo alla glicemia a meno che tu non li abbia attivati.**
 - Attiva gli avvisi durante la configurazione per ricevere gli avvisi relativi alla glicemia e al sistema una volta terminata l'inizializzazione del sensore.
- ⚠ Gli avvisi di Dexcom ONE NON ignoreranno le impostazioni del tuo smartphone.**
 - Se il telefono è impostato su silenzioso (l'audio è disattivato) **NON** sentirai gli avvisi glicemia alta o glicemia bassa.
 - Potrai sentire gli avvisi SOLO se l'audio del tuo smartphone è attivato.

- Per non rischiare di perdere un avviso, controlla le impostazioni del tuo smartphone.

! **Gli avvisi di Dexcom ONE NON ignoreranno le impostazioni del tuo ricevitore.**

- Se il ricevitore è in modalità vibrazione, non sentirai gli avvisi glicemia alta o glicemia bassa.
 - Attiva l'audio del ricevitore per sentire gli avvisi.
-

Utilizzare il tuo sistema in tutta sicurezza

Leggi tutte le istruzioni del prodotto prima di utilizzare Dexcom ONE, comprese le Dichiarazioni sulla sicurezza contenute nel Manuale d'uso di Dexcom ONE.

Inizia

Quale dispositivo di visualizzazione stai utilizzando?

Smartphone



Vai a **Configura smartphone**, pag. 5.

Ricevitore



Vai a **Configura ricevitore**, pag. 8.

Configura smartphone

Solo per la configurazione dello smartphone.
Vai a pag. 8 per il ricevitore.

Fase 1: Configura l'app Dexcom ONE

Configura l'app **prima** di inserire il tuo sensore.

1. Vai all'app store.
2. Cerca Dexcom ONE.




3. Scarica e apri l'app Dexcom ONE
 4. Con l'app aperta, segui le istruzioni sullo schermo, incluse le istruzioni per attivare gli avvisi.
 5. L'accesso a Internet è richiesto durante l'intera configurazione.
-  **Non riceverai alcun avviso relativo alla glicemia a meno che tu non li abbia attivati.**

Quando richiesto, attiva gli avvisi per ricevere gli avvisi relativi alla glicemia e al sistema una volta terminata l'inizializzazione del sensore.

Durante la configurazione, l'app ti chiederà di:


- Inserire il numero di serie del trasmettitore (SN), manualmente o scattando una foto.

Il numero di serie è sul retro del trasmettitore e della scatola.

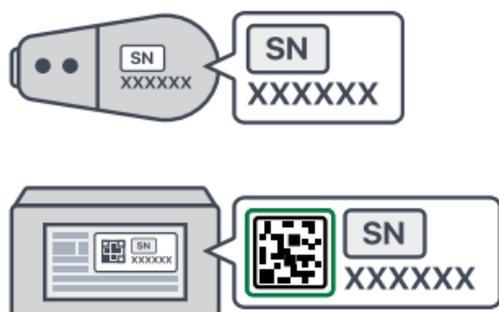

- Inserire il codice sensore rilevandolo dal sensore inserito, manualmente o scattando una foto.

Il codice sensore si trova sull'applicatore.

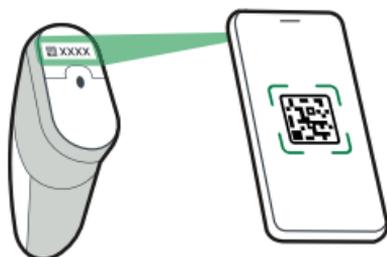

Fase 2: Inizializzazione del sensore

Dopo la configurazione, il sensore ha bisogno di tempo per adattarsi al tuo corpo. Ci vogliono circa 2 ore. Tieni sempre il telefono a non più di 6 metri dal trasmettitore.

NON riceverai letture o avvisi del sensore finché questo non avrà terminato l'inizializzazione.

! Se non l'hai già fatto durante la configurazione, **attiva gli avvisi ora** per riceverli quando il sensore avrà terminato l'inizializzazione.

Attendi 2 ore

Una volta terminata l'inizializzazione del sensore, inizierai a ricevere le letture del sensore.

Fase 3: Controlla le impostazioni del telefono

 **Gli avvisi di Dexcom ONE NON ignoreranno le impostazioni del tuo smartphone.**

- Se il telefono è impostato su silenzioso (l'audio è disattivato) **NON** sentirai gli avvisi glicemia alta o glicemia bassa.
- Potrai sentire gli avvisi SOLO se l'audio del tuo smartphone è attivato.
- Per non rischiare di perdere un avviso, controlla le impostazioni del tuo smartphone.

Fase 4: Attiva gli avvisi

Se non hai attivato gli avvisi durante la configurazione, puoi farlo in qualsiasi momento.

1. Tocca **Impostazioni > Allarmi**.
2. Seleziona l'avviso che desideri impostare.
3. Segui le istruzioni sullo schermo.
4. Ritorna a **Impostazioni > Avvisi** per impostarne un altro.
5. Tocca l'icona **Glucosio**  nella parte inferiore dello schermo per tornare alla schermata iniziale.

Avviso di sicurezza per smartphone

Il tuo smartphone **NON** è un dispositivo medico dedicato. Per assicurarti di ricevere letture del sensore e avvisi:

- **NON** utilizzare uno smartphone violato (con jailbreak o rooted) perché Dexcom ONE potrebbe non funzionare correttamente.
- *Il Bluetooth®* deve essere attivo affinché il trasmettitore e l'app possano comunicare.
- **NON** fare affidamento su Dexcom ONE finché non avrai capito come usarlo e come usare il *Bluetooth* del tuo smartphone.
- Assicurati che gli altoparlanti e lo schermo del tuo smartphone funzionino.

- Quando usi *Bluetooth*, auricolari collegati, altoparlanti, ecc., prova il tuo sistema per scoprire quale dispositivo emette gli avvisi. Questi potrebbero suonare sullo smartphone, negli auricolari, negli altoparlanti, ecc. o su entrambi.
- L'app utilizza la batteria dello smartphone. Tieni il telefono carico per ricevere letture e avvisi.
- Se il tuo smartphone o l'app Dexcom ONE si chiude o non funziona, **NON** otterrai letture o avvisi. Di tanto in tanto controlla che l'app sia aperta e che il *Bluetooth* sia attivo.

Leggi il Manuale d'uso di Dexcom ONE

Impara come:

- Utilizzare il tuo sistema in tutta sicurezza
- Leggere la schermata iniziale
- Impostare e utilizzare gli avvisi
- Prendere decisioni terapeutiche
- Terminare una sessione del sensore
- Avviare una sessione del sensore
- Riutilizzare il trasmettitore
- Risolvere i problemi

Fase 5: Configura il ricevitore Dexcom ONE (opzionale)

1. Premi il pulsante **Seleziona** per 3-5 secondi.
2. Segui le istruzioni sullo schermo, comprese le istruzioni per attivare gli allarmi.



pulsante **Seleziona**

Il ricevitore opzionale potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Configura il ricevitore

Fase 1: Configura il ricevitore Dexcom ONE opzionale

1. Premi il pulsante Seleziona per 3-5 secondi per accendere il ricevitore.



pulsante **Seleziona**

2. Usa i pulsanti per navigare. La schermata indicherà il pulsante da utilizzare.

Scorri verso
l'alto

Torna
indietro



Selezionare

Scorri verso
il basso

3. Segui le istruzioni sullo schermo per impostare il ricevitore, comprese le istruzioni per attivare gli allarmi.


 **Non riceverai alcun avviso relativo alla glicemia a meno che tu non li abbia attivati.**

Quando richiesto, attiva gli avvisi per ricevere gli avvisi relativi alla glicemia e al sistema una volta terminata l'inizializzazione del sensore.

Durante la configurazione, il ricevitore ti chiederà di:

Inserire il numero di serie del trasmettitore (SN).

Trovare il numero di serie sul trasmettitore o sulla scatola del trasmettitore.

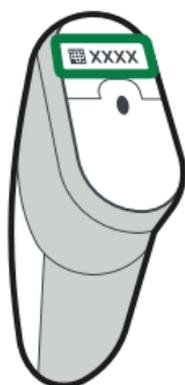

Inserire il codice sensore rilevandolo dal sensore che si sta inserendo. Non utilizzare il codice di un sensore diverso.


Il codice sensore si trova sull'applicatore.

4. Quando vedi questa schermata, metti da parte il ricevitore. Segui le istruzioni in questa guida per inserire il tuo sensore e collegare il trasmettitore.



Fase 2: Inserisci il sensore

A. Decidi dove inserire il tuo sensore

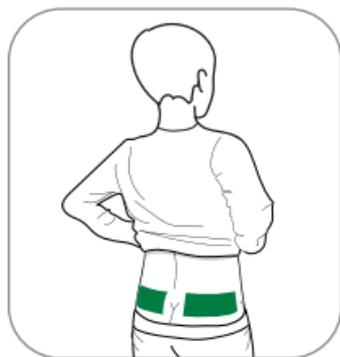

Solo i bambini/ragazzi di età compresa tra 2 e 17 anni possono usare la parte superiore dei glutei.



Tutte le persone dai 2 anni in su possono utilizzare l'addome o il tricipite.

Evitare:

- Aree ossee
- Pelle irritata
- Tatuaggi
- Aree soggette a urti

B. Inserisci il sensore

1



Lava le mani e il sensore con il sapone. Asciuga.

Strofina il sito del sensore con una salvietta imbevuta di alcol.

2



Stacca entrambe le protezioni dell'adesivo dall'applicatore. Non toccare l'adesivo. **Tieni le protezioni.** Mostrano il codice del tuo sensore. **Non posizionare nulla sull'adesivo.** L'adesivo va applicato sulla tua pelle.

3



Posizionare l'applicatore sulla pelle **prima** di rompere la protezione di sicurezza.

4



Piega e rompi la protezione di sicurezza arancione. **Non torcere.**

5



Premi il pulsante arancione per inserire il sensore.

6



Rimuovi l'applicatore dalla pelle mantenendo il cerotto e il supporto in posizione.

7



Getta via l'applicatore. Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei componenti che vengono a contatto con il sangue.

Fase 3: Collega il trasmettitore

1




Pulisci il trasmettitore con una salvietta imbevuta di alcol.

2




Inserisci il trasmettitore nel supporto iniziando dall'aletta.

3

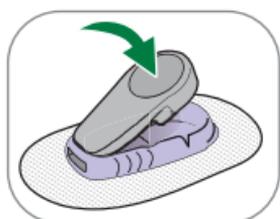


Inserisci il trasmettitore nella sua posizione. Sentirai un clic.

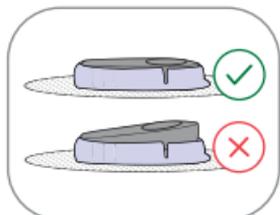

Assicurati che sia in piano e ben aderente al supporto.


4

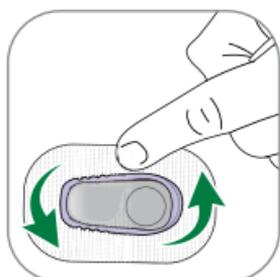

Strofina il cerotto 3 volte per farlo aderire.

Fase 4: Abbina il trasmettitore

1. **DOPO** aver inserito il sensore e aver collegato il trasmettitore, premi il pulsante **Seleziona** per iniziare l'abbinamento del trasmettitore con il ricevitore.

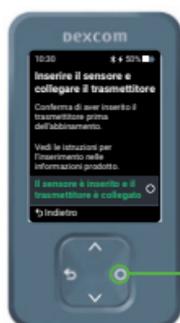

pulsante **Seleziona**

2. Attendi che il trasmettitore si abbinì con il ricevitore. Questo può richiedere fino a 30 minuti.
3. Tieni il ricevitore a non più di 6 metri dal trasmettitore.

Fase 5: Inizializzazione del sensore

Dopo la configurazione, il sensore ha bisogno di tempo per adattarsi al tuo corpo. Ci vogliono circa 2 ore. Tieni il ricevitore a non più di 6 metri dal trasmettitore.

NON riceverai letture o avvisi del sensore finché questo non avrà terminato l'inizializzazione.

 Se non l'hai già fatto durante la configurazione, **attiva gli avvisi ora** per riceverli quando il sensore avrà terminato l'inizializzazione.

Attendi 2 ore

Una volta terminata l'inizializzazione del sensore, inizierai a ricevere le letture del sensore.

Fase 6: Controlla le impostazioni del ricevitore

 **Gli avvisi di Dexcom ONE NON ignoreranno le impostazioni del tuo ricevitore.**

- Se il ricevitore è in modalità vibrazione, non sentirai gli avvisi glicemia alta o glicemia bassa.
 - Per controllare le impostazioni audio del tuo ricevitore: Vai a **Menu > Impostazioni > Suoni avvisi**.
 - Attiva l'audio del ricevitore per sentire gli avvisi.
-

Fase 7: Attiva gli avvisi

 **Non riceverai alcun avviso relativo alla glicemia a meno che tu non li abbia attivati.**

Se non hai attivato gli avvisi durante la configurazione, puoi farlo in qualsiasi momento. Nel tuo ricevitore:

1. Vai a **Menu > Impostazioni > Avvisi**.
2. Seleziona l'avviso che desideri impostare.

3. Segui le istruzioni sullo schermo.
4. Ritorna a **Menu > Impostazioni > Avvisi** per impostarne un altro.

Fase 8: Configura l'app Dexcom ONE (opzionale)

1. Vai all'App Store sul tuo smartphone.
 2. Cerca Dexcom ONE.
 3. Scarica e apri l'app Dexcom ONE.
 4. Segui le istruzioni sullo schermo, comprese le istruzioni per attivare gli allarmi.
-

Leggi il Manuale d'uso di Dexcom ONE

Impara come:

- Utilizzare il tuo sistema in tutta sicurezza
- Leggere la schermata iniziale
- Impostare e utilizzare gli avvisi
- Prendere decisioni terapeutiche
- Avviare una sessione del sensore
- Riutilizzare il trasmettitore
- Risolvere i problemi

© 2022 Dexcom, Inc. Tutti i diritti riservati.

Coperto da brevetti **dexcom.com/patents**.

Dexcom, Dexcom ONE, e Dexcom Care sono marchi registrati di Dexcom, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. *Bluetooth* è un marchio registrato di Bluetooth SIG. Apple è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Android è un marchio registrato di proprietà di Alphabet Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Dexcom



Dexcom, Inc.

6340 Sequence Drive

San Diego, CA 92121 USA

+1.858.200.0200

dexcom.com

Fuori dagli USA: contattare il
rappresentante di zona Dexcom



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover, Germany



AW-00018-56 Rev 001 MT-00018-56

Rev Date: 2022/08