

第2章：安全に関する声明

Dexcom G6の安全に関する声明

適応症

本品は、糖尿病患者の間質液中のグルコース濃度を連続的に測定し、変化の傾向とパターンを表示する持続グルコースモニタシステムです。

本品は高血糖及び低血糖の検出を補助し、通知することによって、その測定結果は血糖値管理を最適化するための情報となります。

本品によって得られた情報は通常使用する血糖自己測定を代替するものではなく、補助することを目的とします。在宅及び医療機関で使用されることが意図されています。

重要なユーザー情報

Dexcom G6を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。使用目的、警告、禁忌禁止を含む使用上の注意、およびその他重要なユーザー情報はG6の取扱説明書でご確認いただけます。G6に表示される情報を使用する方法について、担当の医療従事者にご相談ください。取扱説明書には、G6のトラブルシューティングおよびシステムの性能特性に関する重要な情報が記載されています。

G6手順に従ってください。そうしないと、重度のグルコース低値または高値イベントが発生する可能性があります。

禁忌・禁止

センサーは再使用しないこと。

警告

測定結果が症状と一致しない場合は、血糖自己測定を実施すること。本品の使用によって得られた情報のみを用いて、糖尿病治療を変更すべきではありません。